

# Fast color

<i>Codici</i>	<i>Taglio</i>	<i>Unità di vendita</i>
702-VET	500 ml	3 x 500 ml

Validità: 2 anni

## **Campo d'impiego**

Kit per la colorazione rapida degli strisci ematici. E' indicato per la valutazione degli elementi figurati del sangue. Il quadro cromatico risultante è sovrapponibile al tradizionale metodo May-Grunwald-Giemsa. Il kit è altresì utilizzabile su ogni tipo di striscio citologico asciugato all'aria.

## **Istruzioni**

- 1) Asciugare lo striscio all'aria.
- 2) Immergere il vetrino 5 volte per 1 sec nella soluzione A. Dopo ogni immersione attendere un istante che l'eccesso di liquido sgoccioli.
- 3) Immergere il vetrino 5 volte per 1 sec nella soluzione B. Dopo ogni immersione attendere un istante che l'eccesso di liquido sgoccioli.
- 4) Immergere il vetrino 3-5 volte per 1 sec nella soluzione C. Dopo ogni immersione attendere un istante che l'eccesso di liquido sgoccioli.
- 5) Lavare in acqua di fonte.

## **Risultati**

Nuclei.....blu-viola  
Granuli eosinofili.....rosa-arancio  
Granulazione basofile.....viola

Data compilazione: maggio 2010

*Prodotto per uso veterinario*